

SKLOPIVI MASAŽNI STOL



Uvod

Montaža i demontaža

Sklopivi stol od nehrđajućeg čelika, posebno dizajniran za kozmetičke salone, salone za tetoviranje i masažu.

Primjena

Namijenjen za kozmetičke tretmane lica i tijela, uklanjanje dlačica i njegu kože.

Prikladan za masaže uljem, različite tehnike masaže, aromaterapiju i wellness tretmane.

Tetoviranje: pruža udoban položaj za majstora tetovaže i klijenta tijekom radnog procesa.

Rehabilitacija: fizioterapeuti ga mogu koristiti za izvođenje određenih rehabilitacijskih tehnika.

Konstrukcija i funkcija

Pozicioniranje klijenta: Pomaže klijentu u održavanju udobnog položaja.

Sustav podešavanja visine: Omogućuje postavljanje stola na optimalnu visinu za terapeuta i klijenta.



Sajle za pričvršćivanje: Jamče glatko i sigurno podešavanje visine.

Ručke za nošenje: Olakšavaju rukovanje i pomicanje stola.

Protuklizne noge: Osiguravaju stabilnost stola tijekom korištenja.

Konstrukcija stola

1. Gornji dio od sintetičke kože
2. Stražnje noge
3. Prednje noge
4. Sustav sajli
5. Brava valjka (Roller lock)
6. Ručka
7. Matica (za pričvršćivanje)

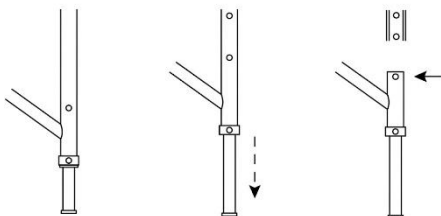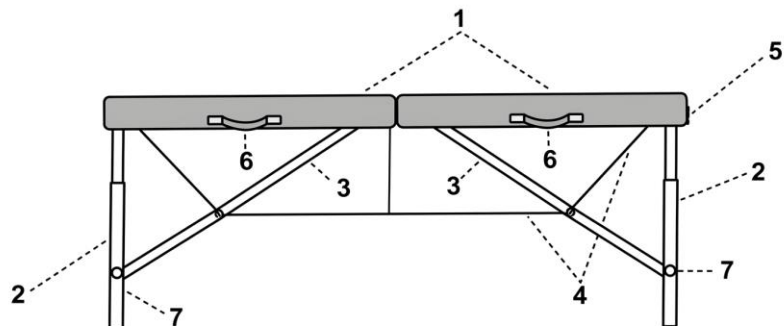

Podešavanje visine

Pritisnite osiguravajući klin.

Pomaknite pomičnu nogu u željeni položaj.

Pritisnite polugu prema dolje.

Montaža i demontaža

Rasklapanje (Otvaranje):

Otvorite bravu valjka.

Razvucite noge do njihove maksimalne širine i učvrstite ih na mjestu.

Postavite stol na stabilnu, vodoravnu površinu.

Zategnite sajle, a zatim osigurajte valjke.

Podesite visinu stola na željenu razinu.

Sklapanje:

Započnite iz najnižeg položaja.

Uklonite svu dodatnu opremu (ako je korištena).

Sklopite stol i osigurajte ga pomoću zatvarača.

Upotreba

Stabilnost: Nakon svakog podešavanja provjerite je li stol stabilan.

Higijena: Nakon svake upotrebe temeljito očistite stol.

Čišćenje i održavanje

Površina stola: Redovito čistite vlažnom krpom i blagim deterdžentom; izbjegavajte prekomjernu vlagu.

Okvir: Redovito čistite okvir vlažnom krpom. Izbjegavajte abrazivna sredstva i jake kemikalije.

Redovito održavanje

Provjerite čvrstoću i stanje vijaka, spojeva i protukliznih klinova.

Sigurnost

Maksimalno opterećenje: Nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje koje je dopustio proizvođač.

Stabilnost: Pripazite da stol stoji na stabilnoj površini.

Prijevoz i skladištenje

Prijevoz: Stol se mora prevoziti u sklopljenom i sigurno učvršćenom stanju.

Skladištenje: Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla.

Važno! Prije prve uporabe pažljivo pročitajte upute. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite nam se s povjerenjem.

Ne zaboravite: Redovito održavanje i namjenska uporaba osiguravaju dug vijek trajanja kreveta.

Sigurnosne mjere pri uporabi:

Ovaj proizvod je prikladan za unutarnju upotrebu i za tretmane te je namijenjen isključivo za jednu osobu.

Nikada nemojte prevoziti pacijenta na ležaju (nosilima).

Nemojte naglo sjedati niti skakati po ležaju.

Ležaj se smije transportirati samo ako su sklopivi sigurnosni zasuni sigurno zaključani.

Nemojte sjedati, klečati niti se naslanjati na naslone za ruke.

Prilikom sklapanja ležaja pazite na ispravan raspored kabela/sajli.

Prilikom zatvaranja stola pazite da ne priklješтите kabele.

Ležaj se mora koristiti i čuvati podalje od otvorenog plamena i izvora topline.

Namjenska uporaba produljuje vijek trajanja proizvoda.

Jamstvo ne pokriva štete nastale nepridržavanjem gore navedenih upozorenja.

Ležaj uvijek koristite u skladu s ovim uputama.

Tehnički podaci

Dimenzije (u rasklopljenom stanju): 210 cm x 60 cm x 52-73 cm

Težina: 15 kg (± 1 kg)

Materijal

Presvlaka: Sintetička koža

Unutrašnjost: Spužva visoke gustoće

Konstrukcija: Nehrđajući čelik